

# Gymna ShockMaster

---

Optimizing your shockwave experience



***gymna***<sup>®</sup>

[gymna.com](http://gymna.com)

# Gymna ShockMaster

## Maximales Resultat bei minimalem Zeitaufwand

### Radiale Stoßwellentherapie

Die ideale Behandlungsmethode bei allen chronischen und komplexen muskuloskelettalen Erkrankungen.

#### Funktionsprinzip


Ein schnell bewegendes Projektil überträgt seine Energie an den Behandlungskopf. Auf diese Weise werden radiale Stoßwellen erzeugt, die im Körper divergieren und vom behandelten Körperbereich aufgenommen werden.

#### Resultat

- Schmerzlinderung
- Regeneration des geschädigten Gewebes
- Abbau von Fibrose und Kalzinose

#### Mehrwert für Ihre Praxis

- Durchschnittlich 6 bis 8 Behandlungssitzungen
- Eine realistische Alternative zur Chirurgie

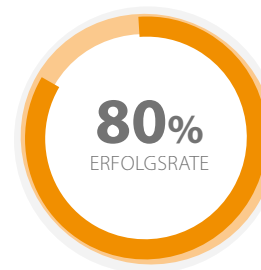

# Gymna ShockMaster

## Wichtigste Indikationen

### Gymna ShockMaster – effizient in der Behandlung von:



#### Sehnen

Die häufigsten Tendinopathien, die mit radialer Stoßwellentherapie behandelt werden, sind Achillessehnen-, infrapatellare und Supraspinatus-Tendopathien sowie seitliche Ellbogenschmerzen.



#### Knochen

Die häufigsten Krankheitsbilder bei Knochen sind Stresssyndrom der medialen Tibia und Schmerzen am Trochanter major.



#### Neurologische Erkrankungen

Die Muskelbehandlung mit der radialen Stoßwellentherapie zur Behandlung von Spastiken sowohl bei post-hemiplegischen Erwachsenen als auch bei Kindern mit Zerebralparese wird allgemein als erfolgreich anerkannt.



#### Muskeln

Muskelbehandlung an Triggerpunkten, bei Muskelkater und erhöhtem Muskeltonus.



#### Bindegewebe

Plantare Faszioopathie, schnellender Finger (auch Schnappfinger genannt) und Narbengewebe sind weit verbreitete Anwendungsgebiete für die radiale Stoßwellentherapie.

# Gymna ShockMaster 500

## Behandlung unter bestmöglichen Voraussetzungen

Die ideale Unterstützung in Ihrer Praxis mit einer Schnittstelle, die einen Schritt weitergeht

### Blieben Sie mit der Benutzerschnittstelle auf dem Laufenden

Die Stoßwellentherapie entwickelt sich noch stetig weiter. Durch ständige Aktualisierung der Behandlungssoftware mit den neuesten Erkenntnissen bleiben Sie auf dem Laufenden:

- Die Behandlungsparameter werden anhand der jüngsten Erkenntnisse angepasst
- Es werden stets neue Erkrankungen mit den dazugehörigen Behandlungsprotokollen hinzugefügt.

### Darüber hinaus erhalten Sie:

- Realistische Behandlungsfotos zur Unterstützung
- Anatomiebibliothek
- Medizinische Informationen über die mit Stoßwellentherapie zu behandelnden Erkrankungen



Neue Untermenüs: Auf der Grundlage des betroffenen Gewebes



Datenbank der Patienten mit Behandlungsverlauf auf der Grundlage des VAS



Visuelle Darstellung der Behandlungszone mit eventueller Schmerzausstrahlung bei der Behandlung von Triggerpunkten

### Benutzerfreundlich

- Ergonomisch geformter Wagen, sämtliches Zubehör ist in Reichweite
- 2 Ausgabekanäle für einfaches und schnelles Umschalten zwischen Handstücken
- Leiser und vibrationsfreier Ölkompessor
- Schnelle Software-Updates über den USB-Port
- Quick start up



Dank der großen Räder schnell und einfach transportabel



Praktisches Kabelaufhängungssystem für Ihre Handstücke



Geordnetes Zubehör durch vorgeformte Schubladeneinteilung

# Gymna ShockMaster 300

## Stoßwellentherapie - jederzeit, überall

*Mobilität dank des kompakten Formats*

### Mobil

- Kleines und leichtes Gerät
- Maßgeschneiderte Tragetasche zur Erleichterung von Transport und Gebrauch
- Geräuscharmer Druckluftkompressor



### Einzigartiges patientengeführtes Therapiesystem

- Plug & Play
- Leuchtleiste: Behandlungsdauer
- Praktische Checkliste für Gegenanzeigen

# Gymna ShockMaster

**Stimmen Sie Ihre Behandlung entsprechend dem Zustand Ihres Patienten genau ab.**

## **1 Bewertung des Zustands des Patienten mit GTS**

Das intelligente patientengeführte Therapiesystem von Shockmaster (patient Guided Therapy System) passt den Grad der Behandlung automatisch an den Zustand Ihres Patienten an.

## **2 Behandlung des betroffenen Bereichs**

Wählen Sie den geeigneten Applikator unter Berücksichtigung von Krankheitsbild und Tiefe, beginnen Sie Ihre Standard-Behandlung auf der Grundlage Ihres pGTS-Ergebnisses.

## **3 Behandlung der entsprechenden Trigger-Punkte**

Wechseln Sie erforderlichenfalls den Applikator und behandeln Sie die entsprechenden Trigger-Punkte.

## **4 Behandlung zur Muskellockerung**

Behandlung von Muskelverspannung, Verbesserung der Durchblutung und Entspannung von Trigger-Punkten mit dem D-Actor.

## **5 Stimulation der Stoffwechselaktivität**

Anregung der Stoffwechselaktivität und Eliminierung von Toxinen, Verbesserung der Mikrozirkulation und Erreichen einer Muskelentspannung mit dem V-Actor.





# Gymna ShockMaster

## Die beste Unterstützung und Erweiterung für Ihre Praxis

*Gymna ShockMaster bedeutet Unterstützung, Fachwissen und Benutzerfreundlichkeit. Diese Geräte bieten dem Therapeuten:*



### **Wissen & Erfahrung**

- Gerät auf dem neuesten Stand mit der aktuellsten Behandlungssoftware auf der Grundlage von Fachwissen und evidenzbasierten Untersuchungen



### **Breiterer Anwendungsbereich**

- Ständig werden neue Behandlungen hinzugefügt
- Sportindikationen
- Schnelleres Resultat durch zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten



### **Mehr Patienten mit schnelleren Ergebnissen**

- Mehr Patienten kommen für Stoßwellentherapie in Betracht
- Ihre Patienten befinden sich schneller wieder auf Aktivitätsniveau
- Ein Anreiz für einen weiteren Ausbau Ihrer Praxis



*Eine Investition, die sich wirklich lohnt*



# Gymna ShockMaster

## Optimizing your shockwave experience



Kryotherapie



Diathermie



Stoßwellentherapie



Physio Care



Behandlungsliegen



Elektrotherapie



Active Motion



Ihr Händler:

[gymna.com](http://gymna.com)

***gymna***<sup>®</sup>

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel DE: 0180 22 52 345 | Tel AT: +43 800 700 208